




JİNEKOLOJİ
SARF MALZEMELERİ

www.promostmedikal.com

SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON KATETER

Serviksin olgunlaştırılması için tasarlanmıştır. Kateter Servikal kanalın genişletilmesinde kullanılır. Doğal ve aşamalı olarak serviksin genişlemesini (olgunlaşmasını) sağlar. Ürün %100 silikondan imal edilmiştir. Uterus içerisinde kalacak olan balon U harfli (uterus) kateterin kırmızı işaretli kısmından 20 mL'lik şırınga kullanılarak 40 mL salin ile şişirilmelidir. Uterus içerisinde 40 mL şişirilmiş olan balon çekilerek balonun iç servikal duvara oturması sağlanır. Uterus dışında kalacak olan balon V harfli (vajen) kateterin yeşil işaretli kısmından 20 mL'lik şırınga kullanılarak 20 mL salin ile şişirilmelidir. Sonrasında her iki balon 80 mL'lik hacimleri kadar salin ile şişirilerek 80'er mL'ye tamamlanır. Kullanım süresi maksimum 12 saattir. Serviks, indüksiyon için elverişsiz iken servikal canlandırıcı balonun servikal kanalın fiziksel olarak dilatasyonu için kullanılır. Her iki balonun basıncını kullanarak, serviksi sentezleyecek ve serviksin olgunlaşmasını sağlayacaktır.

Faydaları:1. doğum sürecini kısaltır, doğumun acısını azaltır2. Tıbbi malzeme en yüksek düzeyde güvenlik sağlar3. Serviks olgunlaşmasının desteklenmesinde etkindir r4. Serviksi ilaçsız olarak olgunlaştırır ve genişletir5. Silikon malzeme bio uyumludur uzun süre vücuda temas ettiğinde hastaya zarar vermez, latex içermez.

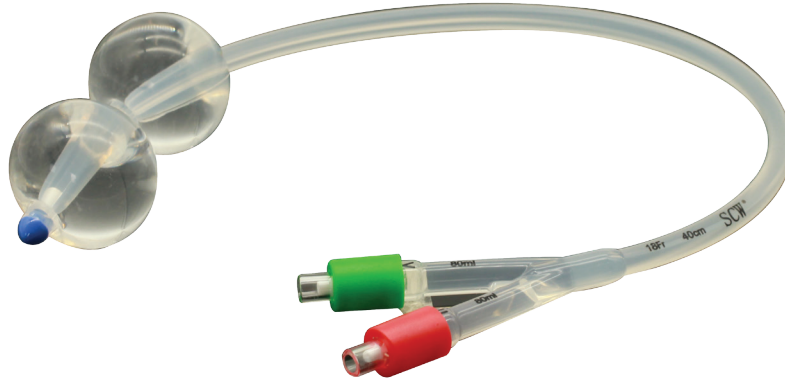

ÜRÜN KODU	KATETER ÇAPI Fr	KATETER UZUNLUK cm	BALON HACMİ ml
PRM-43.01.10000	18	40	80

NEGATİF BASINÇ DRENAJ BALONU

Sıvı ve kan drenajı yapmak için kullanılır. İçerik:1. Silikon balon 2. Hacim İşaretleyici 3. 100cm drenaj hortumu 4. Klemp
Özellikler:1. kontrol etmek için kolay inşaat 2. Kanama gözlemi için tasarlanmış muhafazayı temizler.



ÜRÜN KODU	BALON HACMİ (ml)
PRM-43.99.10000	200

POSTPARTUM BALON KATETER



Doğum sonrası kanamaları için kullanılan balon kateterdir.

Normal yada sezeryan doğum sonrası kanamaları durdurmak ve kontrol altına almak amacıyla tasarlanmıştır. Rahim boşluğun içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte üretilmiştir. balon hacmi 500 ml'dir. balon çift lümeden oluşmaktadır. Bir lümen balonun şişirilmesini sağlarken diğer lümen kanama drenajı yaparak kanamanın kontrol edilmesini sağlar. Kanamanın drenajının ve takibinin yapılmasını sağlayan kanal, distalde balon şişirildikten sonra 2 cm'den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalarak kanama takibinin ve drenajının daha rahat yapılabilmesini sağlar. balon şişirildiğinde uterus anatomisine uygun bir şekil alır. Uterus içinde maksimum 24 saat bırakılmalıdır.

Konservatif tedavi gerektiğinde geçici kontrol veya doğum sonrası uterus kanamasının azaltılması için kullanılır. Balon sterilize edilmiş su ile şişirilirken, doğum sonrası balon hemostaza yardımcı olacak uterus duvarlarına basınç uygular.

Özellikler:

1. Kullanımı ve pozisyon alması kolaydır.
2. Hemostaz teşvik etmek için güvenli ve verimli bir methodur.
3. Hem normal hem de sezaryen için kullanılabilir.
4. Silikon materyalden üretilmiştir. Hastaya zarar vermez , lateks içermez.

ÜRÜN KODU	ÇAPI(fr)	UZUNLUK(cm)	BALON HACMİ(ml)
PRM-43.01.20000	24	55	500
PRM-R43.01.20004	24	55	500

ÜTERİN BALON STENT



Rahim içi adezyonu önlemek ve kanamayı azaltmak için intrauterin cerrahi prosedürü takiben uterusun yerleştirilmesi için kullanılır.

1. Rahim içi adezyon önleme üzerinde belirgin etkiye sahiptir.2. Rahim kanamasını azaltmak için mükemmel bir methodur 3. İşlem sonrası Hiçbir şekilde kontrendikasyon oluşturmaz

ÜRÜN KODU	KATETER ÇAPI Fr	BALON UZUNLUĞU cm	BALON GENİŞLİĞİ cm	MAX. HACİM ml
PRM-43.02.10000	9	3	2.8	5.0
PRM-43.02.20000	9	4	4.0	8.0

Selamet mh.Vardar Cd.No: 5/35 Ecevit Sinem 2 İş Merkezi Osmangazi BURSA - TURKIYE
Tel : +90 224 252 02 01 Fax : +90 224 252 03 01
www.promostmedikal.com info@promostmedikal.com